

## Manuelle Reinigung

# INSTRU PLUS

## Flüssigreiniger für Instrumente und Endoskope

- pH-neutral und materialschonend
- Reinigungsstark und vielseitig kombinierbar
- Für Ultraschallbäder

### Produktbeschreibung

INSTRU PLUS ist ein Präparat zur gründlichen Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie medizinischen und chirurgischen Instrumenten. Als pH-neutraler, aldehydfreier Reiniger auf Tensidbasis ideal zur Reinigung von flexiblen Endoskopen gem. RKI-Empfehlung geeignet. Für die weitere Aufbereitung und einfache Integration ist die Kompatibilität zu den folgenden Desinfektionsmitteln gegeben: PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN TB, DESCOTON FORTE und DESCOTON EXTRA. Zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet.

### Anwendungsgebiete

INSTRU PLUS eignet sich ideal als Instrumentenreiniger in Aufbereitungsprozessen mit folgenden Instrumentendesinfektionsmitteln: DESCOTON FORTE, DESCOTON EXTRA, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ENDO oder PERFEKTAN NEU.

### Anwendung

Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser gemäß nationaler Richtlinien herstellen.

Instrumente, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslösung einlegen.

Flächen und Hohlräume müssen von der Lösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweise

Reinigung von Endoskopen sowie medizinischen und chirurgischen Instrumenten: 0,25 % (2,5 g/L). Je nach Verschmutzung bis zu 5 % (50 g/L).

Die verwendete Gebrauchslösung ist bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich zu wechseln.

### Zusammensetzung

Nichtionische Tenside (5 - 15 %), Konservierungsmittel (Benzalkoniumchlorid).

### Materialverträglichkeit

Die Anwendung von INSTRU PLUS wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen:



Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polysulfon (PSU), Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Polystyren (PS), Acrylonitril-butadienestyren (ABS), Polyurethane (PUR). Die Anwendung von INSTRU PLUS ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Kupfer, Messing.

INSTRU PLUS ist freigegeben zum Einsatz mit Instrumenten und Endoskopen folgender Hersteller:

- Pentax GmbH, Hamburg

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.



pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.
INSTRU PLUS	Flasche	2 L	6	00-104-020-01
	Kanister	5 L	3	00-104-050



Dr. Schumacher



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

